

DYNAMIC



**DYNAMIC
MANUALE UTENTE**

2020-10

**"BECAUSE
EVERY-BODY
IS DIFFERENT"**

PRODOTTO	DYNAMIC
ALTRI NOMI	
PART NUMBER / CODICE IDENTIFICATIVO	A001ST
CONFORMITÀ CE	 <p>Regolamento UE 2017/745 - Dispositivo medico Classe I - Regola 1</p>
PRINCIPALI NORME APPLICATE	<p>ISO 14971:2012 UNI EN 12182:2012</p>
FABBRICANTE	<p>Neatech.it SRL via A. de Curtis 4/A, 80040, Cercola (NA), Italia Tel. +39 081 555 1946 www.neatech.it – info@neatech.it</p>
USO PREVISTO	<p>Il prodotto è destinato a essere impiegato per attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità. In particolare lo scopo è quello di offrire supporto posturale per il bacino dell'utente.</p>

Indice

1. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO	9
1.1. Disimballaggio	9
2. REGOLAZIONI	10
3. USO DEL PRODOTTO	11
3.1. Montaggio della seduta	11
3.1.1. Montaggio della seduta su carrozzina NEATECH	11
3.1.2. Montaggio della seduta su altre carrozzine	13
3.2. Uso in un veicolo a motore	15
3.3. Trasporto e immagazzinamento	16
4. MANUTENZIONE	17
4.1. Pulizia	17
4.2. Controlli da effettuare sul prodotto	18
4.3. Riuso	18
5. SPECIFICHE TECNICHE	19
5.1. Dimensioni	19
6. Assistenza e condizioni di garanzia	20

6.1. Numero seriale.....21

Note..... 22



ATTENZIONE

Questo simbolo indica la presenza di pericolo per l'utente o di danneggiamento del prodotto. Seguire sempre le istruzioni quando questo simbolo è presente.



PERICOLO INTRAPPOLAMENTO



PERICOLO ELETTRICO

Questo simbolo indica la presenza di pericolo legato alla presenza di energia elettrica. Prestare particolare attenzione quando questo simbolo è presente.



INFORMAZIONI

Questo simbolo indica informazioni generali per semplificare o spiegare meglio l'utilizzo del prodotto.



INFORMAZIONI DI CONTATTO

Questo simbolo significa la necessità di contattare un centro servizi autorizzato o il fabbricante.



INCIDENT REPORTING

In caso di incidente contattare il fabbricante.



CENTRI SERVIZI AUTORIZZATI

Contattare il fabbricante per ottenere una lista di centri servizi autorizzati.



Questo prodotto e tutte le sue parti non possono essere trattati come normali rifiuti domestici. Per maggiori informazioni su come riciclare e/o smaltire questo prodotto contattare il locale servizio di smaltimento rifiuti.



Qualsiasi modifica non autorizzata al prodotto può incrementare il rischio di lesioni personali e danni al prodotto. Tutte le modifiche devono essere fatte da un centro servizi autorizzato.

Non usare nessun accessorio o parte di ricambio non autorizzati. Non usare il prodotto in combinazione con altri dispositivi medici senza prima aver considerato eventuali rischi dovuti alla combinazione di più prodotti.



L'uso di questo prodotto su una sedia a rotelle può modificare la posizione del baricentro del sistema sedia + utente con un conseguente aumento del rischio di ribaltamento. Si prega di valutare la possibilità di aggiungere dispositivi antiribaltamento alla propria sedia.



In aggiunta alle informazioni contenute in questo manuale, seguire sempre le informazioni contenute nel manuale della sedia a rotelle su cui la seduta è montata. In caso di discrepanza di informazioni contattare il fabbricante.



ATTENZIONE: È proibito usare il prodotto o sue parti per scopi diversi da quelli indicati in questo manuale. Per un corretto uso seguire le istruzioni indicate. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati da un improprio uso del prodotto.



Le informazioni in questo manuale potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni, figure e specifiche sono basate sui dettagli del prodotto disponibili alla data di redazione di questo documento. Sono esempi rappresentativi e non sono intesi per essere esattamente come il prodotto reale.



TEMPERATURA

La temperatura di alcune superfici potrebbe incrementare se il prodotto è esposto ad elevate temperature ambientali o alla luce solare diretta.



INFORMAZIONI

Per informazioni su come avere accesso alle informazioni e alle istruzioni da parte di persone con disabilità visive, contattare il fabbricante.




Il prodotto non è progettato per essere smantellato. Non ci sono parti del prodotto pensate per essere maneggiate durante il normale uso.



Non installare, mantenere o operare il prodotto senza aver letto tutte le avvertenze e questo intero manuale. Conservare sempre questo manuale vicino al prodotto.

1. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

1.1. Disimballaggio

<p>All'interno dello scatolo ci sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seduta DYNAMIC• Manuale	<p>All'interno dello scatolo ci sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seduta• Manuale		<p>SMALTIMENTO IMBALLAGGIO</p> <p>Per riciclare correttamente i materiali da imballaggio, rivolgersi al servizio di smaltimento rifiuti del locale servizio di smaltimento rifiuti.</p>
--	--	---	--

Il prodotto è fornito già montato e pronto per l'uso. Prima di iniziare a usare il prodotto, assicurarsi che tutti i componenti sono presenti. È preferibile che la prima installazione del prodotto sia eseguita da un centro servizi autorizzato.



Il primo setup del prodotto deve essere eseguito da personale qualificato.

2. REGOLAZIONI



INFORMAZIONI

Non sono previste regolazioni che possono essere effettuate dall'utente.



ATTENZIONE

Non modificare il numero e la posizione degli inserti interni. Gli inserti vanno cambiati solamente su indicazione di personale qualificato.



INFORMAZIONI

Laddove ci sia la necessità di inserti aggiuntivi, rivolgersi ad un centro autorizzato.





ATTENZIONE

Una seduta non ben dimensionata può portare ad un non corretto posizionamento del paziente con possibili conseguenze sulla sua salute.

3. USO DEL PRODOTTO

3.1. Montaggio della seduta

3.1.1. Montaggio della seduta su carrozzina NEATECH

	  <u>Tempo medio richiesto:</u> <5 min <u>Difficoltà media:</u> Facile	
--	---	--



ATTENZIONE

Dopo aver agganciato la seduta dovreste udire uno scatto. Se non si è sicuri di averlo udito potrebbe essere dovuto al fatto che la seduta non è stata correttamente agganciata. Verificarne il corretto bloccaggio.



INFORMAZIONI

Per sganciare il cuscino è sufficiente eseguire le operazioni descritte in ordine inverso.

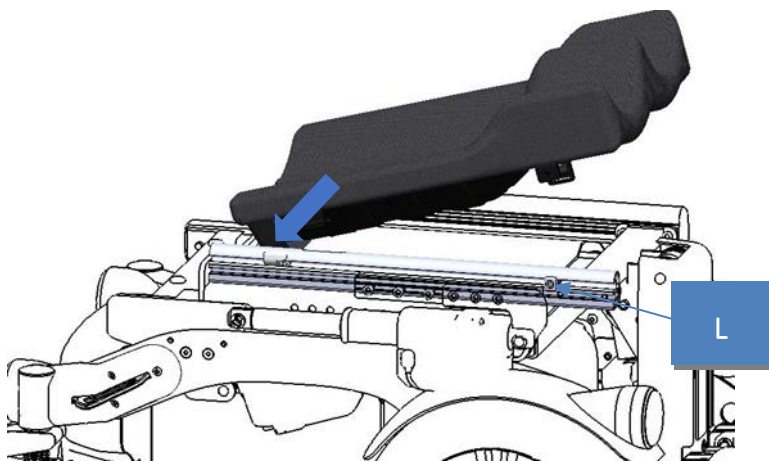




Figura 1

- Posizionare la staffa posteriore in battuta con il blocco posteriore come mostrato in Figura.
- Successivamente la staffa anteriore della seduta andrà bloccata in corrispondenza col dado di battuta (L) in Figura.
- Una volta posizionato il cuscino, assicurarsi di chiudere bene il bottone di chiusura a clip.

3.1.2. Montaggio della seduta su altre carrozzine

	 <p><u>Tempo medio richiesto:</u> <5 min</p>  <p><u>Difficoltà media:</u> Facile</p>	
--	---	--



ATTENZIONE

Dopo aver agganciato la seduta dovrete udire uno scatto. Se non si è sicuri di averlo udito potrebbe essere dovuto al fatto che la seduta non è stata correttamente agganciata. Verificarne il corretto bloccaggio.



INFORMAZIONI

Per sganciare il cuscino è sufficiente eseguire le operazioni descritte in ordine inverso.

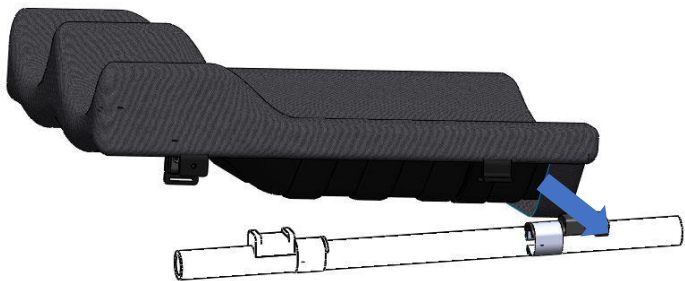


Figura 2

- Posizionare la staffa posteriore in battuta con l'adattatore posteriore come mostrato in Figura.

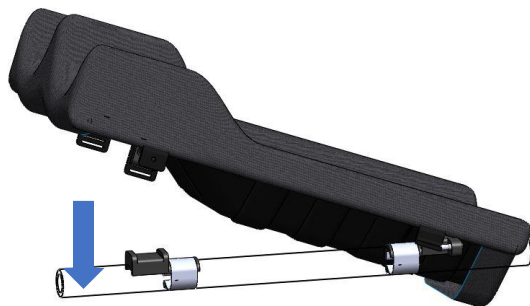


Figura 3

- Posizionare la staffa posteriore in battuta con l'adattatore anteriore come mostrato in Figura.
- Una volta posizionato il cuscino, assicurarsi di chiudere bene il bottone di chiusura a clip.





3.2. Uso in un veicolo a motore

Il prodotto è stato crash testato montato su una carrozzina surrogata con caratteristiche simili a quelle di una tipica sedia a rotelle manuale.

Il prodotto è stato crash testato montato su una carrozzina surrogata con caratteristiche simili a quelle di una tipica sedia a rotelle elettronica classe A.

Il prodotto è stato crash testato montato su una carrozzina surrogata con caratteristiche simili a quelle di una tipica sedia a rotelle elettronica classe B.

	Il prodotto può essere usato su un veicolo a motore solo se la carrozzina su cui è montato è conforme alla norma ISO 7176-19 quando crashtestata rivolta in avanti con il manichino ATD fissato sia da cinture pelviche che cinture pettorali.
	Se possibile, l'utente della carrozzina dovrebbe trasferirsi sui sedili del veicolo ed utilizzare i sistemi di sicurezza previsti dal fabbricante del veicolo. La carrozzina inoccupata dovrebbe essere trasportata nel vano bagagli o comunque assicurata all'interno del veicolo. Utilizzare sempre cinture conformi alla norma ISO 10542-1.
	Modifiche o alterazioni non devono essere eseguite su punti di aggancio della carrozzina o su parti e componenti del telaio senza consultare il fabbricante della carrozzina.
	Dovrebbero sempre essere usati sia una cintura pelvica che un bretellaggio per il tronco in modo da ridurre la possibilità di un impatto del capo o del tronco con parti del veicolo.
	Se possibile, gli accessori della carrozzina dovrebbero essere fissati in maniera sicura alla carrozzina stessa oppure rimossi e fissati in maniera sicura all'interno del veicolo, in modo che non possano rompersi e causare danni agli occupanti del veicolo in caso di incidente.

	il prodotto deve essere ispezionato da un rappresentante del fabbricante prima di poter essere riutilizzato in seguito al coinvolgimento in qualsiasi tipo di incidente veicolare.
	Modifiche o alterazioni non devono essere eseguite su punti di aggancio della carrozzina o su parti e componenti del telaio senza consultare il fabbricante della carrozzina.
	Bisogna prestare attenzione quando si applicano le cinture a posizionare la fibbia delle cinture in modo che il bottone di sgancio non entri in contatto con nessun componente della carrozzina durante un incidente.
	Utilizzare sempre sistemi di bloccaggio per sedie a rotelle e occupanti approvati secondo la ISO 10542-1 e adatti al peso della sedia a rotelle.

3.3. Trasporto e immagazzinamento

È possibile immagazzinare il prodotto in ambienti con temperatura fra -20 °C e +45 °C.

Il prodotto può essere trasportato nel bagagliaio di un veicolo anche senza nessuno scatola. Il prodotto può anche essere trasportato via aerea. Se è necessario spedire il prodotto, è necessario proteggerlo con un adeguato imballaggio.

Non è possibile fornire un imballaggio universale, quindi l'utente deve provvedere lui stesso. L'imballaggio usato deve essere resistente all'acqua e alla polvere e resistente abbastanza per proteggere il prodotto dagli urti. Quando si inserisce il prodotto nello scatola proteggere tutte le parti sporgenti con un po' di spugna o materiali simili. Se non si ha intenzione di usare il prodotto per lungo tempo, conservarlo in un'area pulita e lontana da fonti di calore.

4. MANUTENZIONE

Una manutenzione regolare aiuta a mantenere intatte la funzionalità e la sicurezza del prodotto. Mancanza o inadeguatezza di manutenzione potrebbero causare una limitazione della garanzia. Evitare il contatto prolungato del prodotto con acqua. Potrebbe causare ossidazione delle parti metalliche. Evitare la lunga esposizione del prodotto alla luce diretta del sole.



ATTENZIONE

Qualsiasi intervento di riparazione sul prodotto deve essere eseguito da un centro servizi autorizzato.

4.1. Pulizia

Per pulire il prodotto non usare acqua ad alta pressione. Per le parti in plastica usare un panno soffice inumidito con un detergente neutro. Per i rivestimenti e le cover usare acqua calda e un detergente neutro. Non usare smacchiatori, solventi, acidi, ecc. Pulire separatamente le diverse parti della seduta: separare le parti in tessuto dalle parti in plastica. Per farlo agire sugli strappi che si trovano nella parte posteriore della seduta e rimuovere la fodera.



ATTENZIONE

Quando si inserisce nuovamente il Pad seduta, assicurarsi che lo strato di colore giallo, sia rivolto verso il basso.

RIVESTIMENTO



Lavare in lavatrice in
acqua calda a 60°C



Asciugare senza stirare



Non strizzare



Non candeggiare

SPUGNA

Dopo aver rimosso la spugna dalla fodera, pulirla utilizzando semplicemente un panno inumidito. Non usare alcun tipo di sapone o detersivo. Non immergere la spugna direttamente in acqua. Lasciare quindi asciugare all'aria. Prima di riposizionare la fodera assicurarsi che la spugna sia ben asciutta.

ALTRE PARTI

Utilizzare semplicemente un panno inumidito con un detergente neutro.

4.2. Controlli da effettuare sul prodotto

Tipo di operazione	
A	Operazione che può essere eseguita dall'utente.
B	Operazione che può essere eseguita da un assistente.
C	Operazione che deve essere eseguita da un centro servizi autorizzato.

Tabella 1

Operazione	Frequenza	Tipo di operazione
Controllare che la seduta sia correttamente posizionata.	Prima di ogni utilizzo	B - Assistente
Pulire il prodotto.	Mensilmente	B - Assistente

Tabella 2

4.3. Riuso

Il prodotto è adatto per il riutilizzo. Prima di cedere il prodotto, questo deve essere pulito e sottoposto a manutenzione. Le istruzioni operative sono incluse in questo manuale e devono essere fornite quando il prodotto viene ceduto.





ATTENZIONE

Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente presso un centro servizi autorizzato.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Massa del manichino usato per i test	150 kg
Il prodotto è conforme ai requisiti di infiammabilità della ISO 7176-16	YES - SI
Massimo peso utente	150 kg
Vita media prevista [anni]	5

5.1. Dimensioni

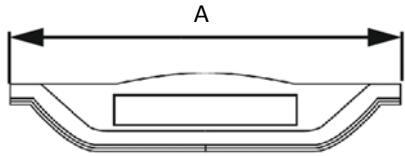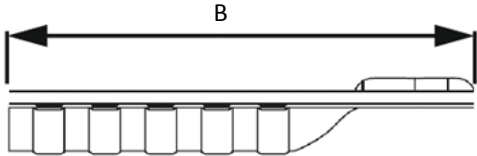	
A	B
300 mm	MAX 420 mm
340 mm	MAX 460 mm
380 mm	MAX 500 mm
420 mm	MAX 52 mm
460 mm	MAX 56 mm

6. Assistenza e condizioni di garanzia

Definizioni

FABBRICANTE: Per fabbricante si intende la persona giuridica che fabbrica un prodotto. Per l'ambito di applicazione del seguente regolamento il fabbricante è:

Neatech.it s.r.l.

via Antonio de Curtis 4/A – 80040 – Cercola (NA)

Tel. +39 081 555 1946 – info@neatech.it – neatech@pec.it – www.neatech.it

P.IVA IT04812481218 – REA NA715393

CLIENTE: Per cliente si intende la persona fisica o giuridica che acquista un prodotto del fabbricante. Per l'ambito di applicazione del seguente regolamento il Cliente è l'intestatario del documento fiscale emesso dal fabbricante in seguito alla fornitura del prodotto.

PRODOTTO: Per prodotto si intende il bene fornito dal fabbricante al cliente in esecuzione di un ordine di acquisto.

Ambito della garanzia

Il fabbricante si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti a lui imputabile in conseguenza di errori di progettazione, costruzione o per difetti del materiale verificatosi nel periodo di applicazione della garanzia.

Periodo di applicazione della garanzia

Il periodo di applicazione della garanzia inizia con la data di fatturazione al cliente. La durata del periodo di applicazione della garanzia varia in base alla tipologia di prodotto.

Tipologia di prodotto	Durata della garanzia [mesi]
Sedie a rotelle manuali	24
Sedie a rotelle elettroniche (escluse batterie)	24
Parti di sedie a rotelle e accessori (escluse batterie)	24
Batterie	6

Tabella 3

Eventuali interventi di riparazione o sostituzione in garanzia non alterano l'originario periodo di applicazione della garanzia.

Esclusioni

La garanzia copre difetti di conformità nei materiali e nella manodopera.

La garanzia non copre parti soggette ad usura.

A titolo di esempio si elencano di seguito alcune parti soggette ad usura.

- Parti imbottite (spugne poliuretatiche, viscoelastici)
- Rivestimenti (inclusi teli)
- Impugnature e manopole
- Filtri

La garanzia è limitata a danni relativi al prodotto e non può in nessun caso coprire danni causati a terze parti in seguito a guasti del prodotto.

La garanzia non copre parti danneggiate da sovraccarico, uso inappropriato, alterazioni e riparazioni fatte da terzi parti non autorizzate. La garanzia decade in caso di manomissioni, errata conservazione, manutenzione non corretta o non autorizzata.

6.1. Numero seriale

Per qualsiasi richiesta di assistenza o segnalazione, comunicare il numero seriale del prodotto.

Note

DYNAMIC

